

# UROSENSOR™ ANLEITUNGEN

**PRÜFUNG:** Jeden Abend vor dem Gebrauch Testen Sie den Urosensor™ und das DRI Excel® Alarm.

Stecken Sie den Urosensor™ in das DRI Excel® Alarm- und schieben Sie den Urosensor™ langsam in einen Behälter mit heißem Wasser (dies etwa annähernd Urin, obwohl Urin ist viel mehr leitend), und sehen Sie, wie viele Paare der schwarzen Sensing Stäbe müssen eingefügt werden vor dem Auslösen der DRI Excel®. Wenn mehr als drei Paar Stäbe, die eingefügt werden müssen, dann reinigen Sie den Urosensor™ durch gut Bürsten mit Wasser und Seife mit einer weichen Bürste (zB: eine gebrauchte Zahnbürste).

Wiederholen Sie den Test und es sollte nur nach dem Eintauchen von einem oder zwei Paaren der schwarzen Sensing Stäbe auszulösen. Wenn das Waschen das Funktionieren nicht verbessert, dann ist es Zeit, einen Ersatz Urosensor™ zu kaufen.

Die Urosensor ist ein Verschleißteil und so ist es dringend empfohlen, dass ein Ersatzteil Urosensor gekauft wird, so dass es keine Unterbrechung der Behandlung, wenn die Urosensor ersetzt werden muss. Aus hygienischen Gründen wird der Urosensor **nicht zurückgenommen**.

