



INSTRUCCIONES

Las siguientes instrucciones muestran una descripción básica sobre cómo usar CathWear.

Para instrucciones sobre el uso de CathWear para configuraciones de catéter específicas, visítanos en nuestra página de web www.CathWear.com para ver los videos instructivos de *How To Use CathWear (Como Usar CathWear)* que están localizado en la sección de *Our Product (Nuestro Producto)*.

Las instrucciones específicas del catéter que están en www.CathWear.com son:

Instrucciones para BILIAR catéter

Instrucciones para FOLEY catéter

Instrucciones para SUPRAPUBICO catéter

Instrucciones para NEFROSTOMIA catéter

1.



ENROLLA LA BOLSA DE ORINA/DRENAJE DE PIERNA

2.



PASE LA BOLSA DE ORINA/DRENAJE DE PIERNA A TRAVÉS DEL TRACTO QUE MEJOR LE CORRESPONDE

3.



DESENROLLA LA BOLSA DE ORINA/DRENAJE DE PIERNA

4.



COLOCA LA BOLSA DE ORINA/DRENAJE DE PIERNA EN EL BOLSILLO

5.



COLOCA LA VÁLVULA POR LA APERTURA HALLADO EN EL FONDO DEL BOLSILLO