



BOUTEILLE DE DRAINAGE URINAIRE SYSTÈME DE COLLECTE D'URINE


POUR UTILISATION AVEC LES CATHÉTERS FOLEY À DEMEURE,
LES CATHÉTERS EXTERNES MASCULINS ET LES APPLICATIONS
DE UROSTOMIE

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN
POUR LE PRODUIT N° 4100



CONTENU DU KIT:


- 1 Bouteille de drainage urinaire durable (N° 410001)
 - 1 Couvercle de bouteille avec boîtier (N° 4101)
 - 1 Tuyau de drainage de 60" (1,5 m) avec adaptateur et capuchon (N° 6061)
 - 1 Pince à tuyau ajustable (N° 6999)
 - 1 Adaptateur pour bouteille de drainage urinaire (N° 6003)
 - 1 Soupape anti-reflux rouge "HIGH-FLOW" (N° 6001)
 - 1 Grand anneau en caoutchouc (N° 6000)
 - 1 Paire de crochets pour suspendre (N° 4102)
- Instructions illustrées d'utilisation et d'entretien

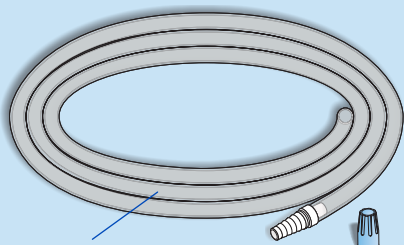


N° 6061 Clear-Vinyl Drainage Tube with Graduated Adaptor and Cap




N° 6999 Pince à tuyau ajustable

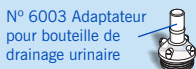

N° 6003 Adaptateur pour bouteille de drainage urinaire

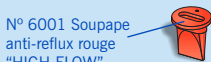

N° 6001 Soupape anti-reflux rouge "HIGH-FLOW"

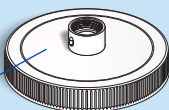

N° 4101 Couverture de bouteille avec boîtier



N° 410001 Bouteille de drainage urinaire (ne se vend pas séparément)


N° 603005 boîtier de valve supérieur (non vendu séparément)

N° 4102 Crochets pour bouteille de drainage urinaire



L'urine peut s'écouler du capuchon aéré si la bouteille ne reste pas en position verticale


Si la valve anti-reflux rouge est manquante ou retirée, des fuites peuvent se produire autour du boîtier de la valve situé au centre du capuchon. L'utilisation de l'anneau en caoutchouc inclus (N° 6000) sera nécessaire pour sceller les filets du boîtier afin d'éviter les fuites.

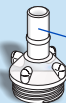

N° 6003 Adaptateur pour bouteille de drainage urinaire



N° 6001 Soupape anti-reflux rouge "HIGH-FLOW"

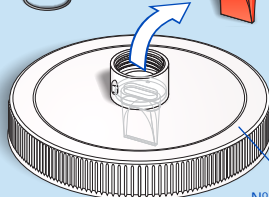

N° 4101 Couverture de bouteille avec boîtier

IMPORTANT: Pour éviter les problèmes de drainage, avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement toutes les instructions et informations. Comprenez comment ça marche et comment l'entretenir correctement.

FIGURE 2
DÉTAIL DU BOÎTIER SUPÉRIEUR DE LA VALVE

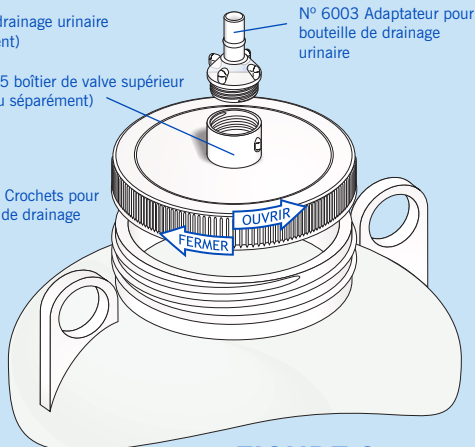


FIGURE 3
GROS PLAN DU CAPUCHON DE LA BOUTEILLE

FIGURE 1

ASSEMBLAGE DE LA BOUTEILLE

Pour retirer l'adaptateur (N° 6003) du capuchon de la bouteille, retirez le tuyau (N° 6061), maintenez le boîtier (N° 603005) en place et tournez l'adaptateur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour retirer la valve anti-reflux (N° 6001), retirez le capuchon de la bouteille et poussez la valve à travers le boîtier avec votre doigt de bas en haut.

Vérifiez la valve pour tout signe visible de dommage, de déformation ou de lèvres coincées. Pressez doucement les côtés de la valve jusqu'à ce qu'elle s'ouvre; lorsqu'elle est relâchée, les lèvres de la valve doivent se refermer à plat. Pour garantir un bon fonctionnement, assurez-vous que toutes les pièces sont réassemblées correctement avant de les réutiliser—voir la figure 2.

IMPORTANT! LISEZ CECI EN PREMIER :

Pour éviter d'éventuels problèmes de drainage, lisez attentivement toutes les instructions et précautions avant utilisation. La bouteille doit toujours rester en position verticale pendant l'utilisation ; si elle est tirée ou renversée, de l'urine peut s'échapper du bouchon ventilé de la bouteille.

Puisque la valve anti-reflux rouge (N° 6001) sert à deux fins : premièrement, comme valve anti-reflux et deuxièmement, comme joint pour éviter les fuites, il est important que la valve reste en place pendant l'utilisation. Si l'utilisation de la valve anti-reflux n'est pas souhaitée, un anneau de joint (N° 6000) sera nécessaire pour sceller les filetages du boîtier supérieur de la valve afin d'éviter les fuites.

À UTILISER AVEC LES CATHÉTERS DE TYPE FOLEY® :

ÉTAPE 1: Retirez le capuchon de l'adaptateur en forme de cône sur le tube de drainage en vinyle transparent (N° 6061) – voir figure 1. Fixez l'extrémité de sortie du cathéter de Foley® à l'adaptateur en forme de cône sur le tube de drainage.

ÉTAPE 2: Attachez l'extrémité opposée du tube de drainage en vinyle transparent à l'adaptateur de bouteille de drainage urinaire (N° 6003).

ÉTAPE 3: Insérez la valve anti-reflux (N° 6001) dans le boîtier de valve supérieur du bouchon de la bouteille (N° 4101) – voir figure 2.

ÉTAPE 4: Branchez l'adaptateur de bouteille de drainage urinaire (N° 6003) au boîtier de valve supérieure (N° 603005) du bouchon de la bouteille (N° 4101), puis le bouchon à la bouteille de drainage (N° 410001) – voir figure 3.

À UTILISER AVEC LES CATHÉTERS EXTERNES MASCULINS :

ÉTAPE 1: Suivez les étapes 1 à 4 ci-dessus.

ÉTAPE 2: Une fois le cathéter, le tube de drainage, le bouchon du flacon et le flacon connectés, l'air restant dans le cathéter doit être expulsé dans le flacon. Cela garantira que la valve d'entrée unidirectionnelle (anti-reflux) fonctionne correctement et qu'un siphon se crée plus facilement lorsque l'urine est évacuée. Si vous le souhaitez, amorcer le système avec de l'eau du robinet avant utilisation peut aider à créer une condition de siphon immédiate.

GARDER VOTRE FLACON DE DRAINAGE URINAIRE PROPRE :

Le meilleur moment pour nettoyer un appareil urinaire est immédiatement après utilisation. Le rinçage seul ne nettoie pas un appareil urinaire et l'utilisation de vinaigre, d'eau de Javel ou de nettoyants pour cuvettes de toilettes ne fait que durcir, déformer et endommager les pièces en caoutchouc, en latex et en plastique. Un nettoyage inapproprié ou inadéquat peut causer des dommages irréversibles et une décoloration de la plupart des systèmes de collecte d'urine... sans parler des odeurs désagréables et embarrassantes.

Nous recommandons l'utilisation du nettoyant et du déodorant pour appareils urinaires et de stomie Urolux®. Lorsque cette solution concentrée est mélangée à de l'eau, elle nettoie et désodorise les appareils urinaires et de stomie. Les accumulations de cristaux sont dissoutes et les odeurs désagréables sont éliminées.

Ne laissez pas cela arriver à votre appareil urinaire!



- Nettoie efficacement tout le trajet du fluide
- La formule concentrée va très loin
- Dissout les accumulations de cristaux uriques

Urolux® est vendu en bouteille dans les formats suivants:

Article N° 700216 Taille standard de 16 oz. liquides (473 mL.) et

Article N° 700204 Petite taille/essai de 4 oz. liquides (118 mL.).





Urocare[®] Sacs de Jambe en Latex Réutilisables
Uro-Safe[®] Sacs de Jambe en Vinyle Jetables
Urocare[®] Flacons de collecte d'urine
Systèmes et Kits de Drainage Urinaire
Systèmes et Trousses d'Urinoirs pour Hommes
Uro-Con[®] et Uro-Cath[®] Cathéters Externes Masculins
Valves et Adaptateurs de Drainage
Porte-sacs de Jambe en Tissu et Sangles
Sangles pour Cathéter
Uro-Bond[®] Adhésif Silicone à Appliquer au Pinceau
Urofoam[®] Bandes de Mousse Adhésive
Tampons de Retrait d'Adhésif
Tracho-Foam[®] Disques de Mousse Adhésive
Uro-Prep[®] Lingettes Protectrices de Barrière Cutanée
Urolux[®] Nettoyant et Désodorisant pour Dispositifs Urinaires
Connecteurs et Pincés
Tubes d'Extension et de Drainage
Alarms de Rraitement pour l'Énurésie DRI Excel[™] et DRI Eclipse[™]

Pour plus d'informations sur ce produit ou tout autre produit Urocare, veuillez visiter notre site Web à l'adresse www.urocare.com. Pour passer une commande, veuillez communiquer avec votre fournisseur de soins de santé.



Urocare Products, Inc.
2735 Melbourne Avenue
Pomona, CA 91767-1931
U.S.A.



États-Unis et Canada: +1 (800) 423-4441
À l'extérieur des États-Unis: +1 (909) 621-6013



sales@urocare.com



Fabriqué aux
États-Unis

EN SAVOIR PLUS



FORMULAIRE N°: PI4100FR-68521101B