

UROSENSOR™ INSTRUCCIONES

PRUEBAS: Cada noche antes de la prueba del uso Urosensor™ y la alarma DRI Excel®.

Enchufe el Urosensor™ en la alarma DRI Excel® e inserte suavemente el Urosensor™ en un recipiente con agua caliente (esto se aproxima más o menos orina, aunque la orina es mucho más conductor), y ver cuántos pares de las barras negras de detección deben insertarse antes de activar el DRI Excel®. Si hay más de tres pares de barras que deben incorporarse, y luego limpiar el Urosensor™ cepillando bien con agua y jabón con un cepillo suave (es decir: un cepillo de dientes usado).

Prueba de nuevo y ahora deben dar lugar después de la inmersión de uno o dos pares de las barras detectoras. Si el lavado no mejoró el funcionamiento, entonces es el momento para comprar un Urosensor™ reemplazo.

El Urosensor™ es un artículo consumible y por lo que se recomienda encarecidamente que un Urosensor™ repuesto se compra de manera que no haya ninguna interrupción en el tratamiento si la Urosensor™ necesita ser reemplazado. Por razones de higiene el Urosensor™ **no es retornable**.

