

# UROSENSOR™ INSTRUCTIONS

**TESTING:** Chaque soir avant le critère de l'utilisation de la Urosensor™ et l'alarme DRI Excel®.

Branchez le Urosensor™ dans l'alarme DRI Excel® et insérez-la délicatement Urosensor™ dans un récipient d'eau chaude (ce qui correspond approximativement à peu près urine, bien que l'urine est beaucoup plus conducteur), et de voir combien de paires des barres noires de détection doivent être insérées avant le déclenchement de la DRI Excel®. Si plus de trois paires de barres doivent être insérés, puis nettoyer la Urosensor™ par brossage au savon et à l'eau à l'aide d'une brosse douce (ex: une brosse à dents utilisée).

Tester à nouveau et il devrait maintenant se déclencher après immersion d'une ou de deux paires de barres de détection. Si le lavage n'a pas amélioré le fonctionnement, alors il est temps d'acheter un Urosensor™ remplacement.

Le Urosensor™ est un élément consommable et il est donc fortement recommandé qu'un Urosensor™ de rechange est acheté afin qu'il n'y ait pas d'interruption dans le traitement si le Urosensor™ doit être remplacé. Pour des raisons d'hygiène du Urosensor™ **n'est pas remboursable.**

